

## Artikel 27405 - Ribbstol av trä

### Installation och underhåll av ribbstolar

#### Installation av ribbstolar:

- 1) Öppna kartongen och ta bort skyddsplasten runt produkten.
- 2) Placera ribbstolens andra vertikala sida ned på en plan yta så att hålen ligger uppåt.
- 3) Tryck försiktigt in stängerna i hålen.
- 4) Placera ribbstolens andra vertikala sida ovanför stängerna.
- 5) Placera stängerna i hålen. Skruva några insektsskruvar löst så att den övre vertikala sidan blir enklare att hantera. Använd den längre insektsnyckeln som finns i kartongen.
- 6) Tryck försiktigt in sidorna (vertikala) i stängerna.
- 7) Skruva åt och placera alla insektsskruvarna försiktigt på båda sidorna.
- 8) Säkra väggfästena på de vertikala sidorna av ribbstolens övre och nedre ände (använd den kortare insektsnyckeln). Väggfästena kan fästas på utsidan eller insidan av ribbstolen. Med väggfästenas position kan du bestämma avståndet mellan ribbstolen och väggen (antingen 3,5 cm eller 10 cm).
- 9) Väggbankare i universalplast och skruvar medföljer. Väggbankare är lämpliga för olika väggtyper. Innan ribbstolen monteras på väggen måste du dock mäta och kontrollera ditt väggmaterial och avgöra den bästa installationsmetoden. Vid behov, kontakta en fackman (t.ex. byggarbetare) som kan bekräfta väggtypen, rätt väggbankare och rätt sätt att montera på väggen med väggbankare.
- 10) Ribbstolen är installerad på väggen på ett sådant sätt att de vertikala sidorna fästs i golvet.

#### Underhåll:

1. Ribbstolar kan rengöras med ett mildt rengöringsmedel och en fuktig trasa. Torka av stängerna med trasan.
2. Ankarskruvarna och insektsskruvarna måste kontrolleras och dras åt var tredje månad, eller omedelbart om du upptäcker något avvikande!

Vid frågor kontakta Medema Physio AB, tel. 08-404 12 00 eller via e-post:  
info@medema.se