


Tämä ohje koskee Lojer Afia 4050-tutkimuspöytiä, jotka on valmistettu ennen 03/2013. Ohjeessa on esitetty tutkimuspöydän istuinosan (gyneosan) verhoilun lukitsemiseen tarkoitetun lukituslaitteen (Kuva 1) asennus ja käyttö. Ennen asennusta lue koko ohje läpi. Tutustu lukituslaitteeseen sekä sen asennuskohtaan tutkimuspöydässä. Alla on linkki, jossa on lukituslaitteen asennusvideo. Katso myös video ennen asentamista.

Linkki asennusvideoon: https://media.lojer.com/public/4050_lukituslaitteen_asennus/170441.mp4

QR-koodi videoon:

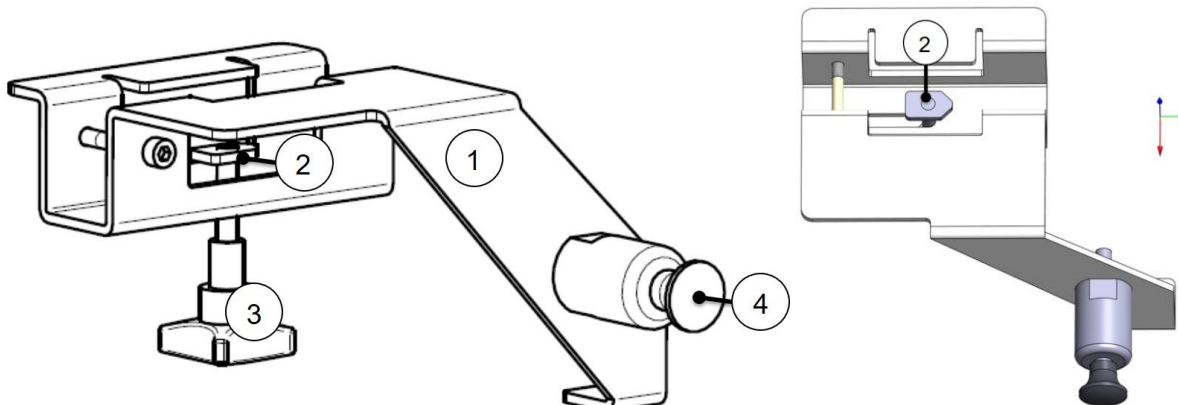

Kuva 1: Lojer Afia 4050 gyneosan verhoilun lukituslaite

Nro	Nimitys
1	Lukituslaitteen runko
2	Kiristyspala (pujotetaan tutkimuspöydän runkoon)
3	Tähtinuppi
4	Vetonuppi lukituksen vapauttamista varten

Lukituslaite asennetaan pöydän runkoon jalkopäästä katsottuna oikealle puolelle (eri puolelle kuin gynemalja). Asennuskohta alla (Kuva 2).



Kuva 2: Lukituslaitteen asennuskohta


Nro	Nimitys
1	Oikean puolen sivurunkoputki
2	Istuinosan runkoputken reikä, johon kiristyspala asennetaan

Vaihe 1: Nosta istuinosa (gyneosa) ylimpään asentoon (Kuva 3).



Kuva 3: Gyneosa käännettynä ylimpään asentoon

Vaihe 2: Paina vetonupin (Kuva 1 (4)) tappi runkoputkea vasten (Kuva 4 a)) ja aseta lukituslaite vasten istuinosan (gyneosan) runkoputkea. Putken päässä on muovinen tulppa (Kuva 4 b)).

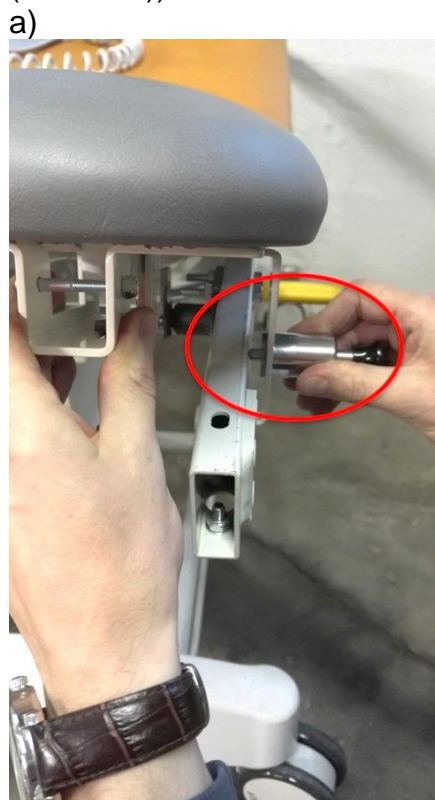

Kuva 4: Lukituslaitteen asennus a) vetonupin tappi painettuna runkoputkea vasten b) lukituslaite vasten istuinosan runkoputkea (muovitulppa)

Vaihe 3: Kuvassa 5 a on esitetty reikä, johon kiristyspala (Kuva 1 (2)) pujotetaan (Kuva 5 b)& c). Kiristyspala tulee pujottaa reikään suora reuna Kuva 1 (2)) edellä kohti gyneosan etureunaa.

a)



b)



c)



Kuva 5: Gyneosa käännettynä ylimpään asentoon

Vaihe 4: Kiristyspala pujotetaan reikään suoristamalla tappi. Kiristä tähtinupista (Kuva 6)(Kuva 1 (4)).



Kuva 6: Kiristyspala pujotettuna reikään. Kiristys kiertämällä tähtinuppia.

Lukituslaitteen käyttö

Vaihe 1: Vedä vetonupista, jotta lukitus vapautuu (Kuva 7a)). Tämän jälkeen istuinosa (gyneosa) säätyy haluttuun kulmaan kuten ennenkin kääntämällä kahvasta (Kuva 7b)).

a)



b)



Kuva 7: Lukituslaitteen käyttö

Laskettaessa istuinosa (gyneosa) lukittuu alas paikalleen, kun vetonupin tappi naksahdaa runkoputken alle.

Liimaa lopuksi mukana tulleet huopatarrat runkoputkien yläpintaan kuvan 8 mukaisesti. Huovan liimauskohdat on esitetty punaisella. Huovan reuna tulee olla putken pään tasalla.

Liimaa tämän puolen runkoputkeen pidempi huopatarra



Liimaa tämän runkoputken päähän
Lyhyempi huopatarra.

Kuva 8: Huopatarrojen asennuskohdat runkoputkien yläpinnassa